


DIABÈTE - AIGUILLES À STYLO BD MICRO-FINE ULTRA™

LES ÉTAPES CLÉS DE L'INJECTION



Vérifiez toujours la compatibilité de votre aiguille avec le stylo injecteur utilisé.


1 Lavez vos mains à l'eau tiède et au savon




Et veillez à les rincer et les sécher soigneusement. L'injection doit se faire sur une peau propre et saine.

2 Uniquement en cas d'utilisation d'une insuline laiteuse (NPH, mélanges)


Réalisez une remise en suspension de la solution.

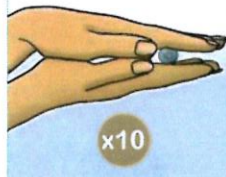

Roulez le stylo entre les paumes des mains (10 fois).

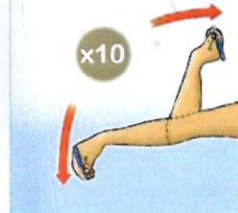


Retournez lentement le stylo (10 fois).

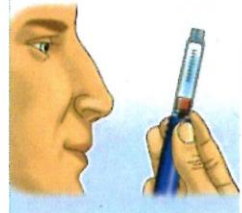

Contrôlez visuellement que l'insuline est bien homogène.


3 Fixez votre aiguille sur le stylo

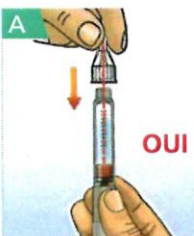

Approchez l'aiguille dans l'axe du stylo.



Une aiguille fixée de travers peut entraîner des fuites et/ou une torsion de l'aiguille interne (côté cartouche) ou une délivrance incomplète de la dose. ⚠

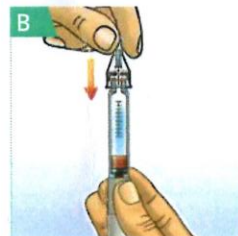

Percez le septum de la cartouche avec l'aiguille interne (côté cartouche).



Vissez complètement l'aiguille sur le stylo pour une bonne fixation de l'aiguille.

4 Effectuez une purge




Avant chaque injection, faites perler l'insuline (2 unités) au bout de l'aiguille en tenant le stylo vers le haut. Cela permet :

- d'éliminer les bulles d'air,
- de vérifier le bon fonctionnement du système.

Dans tous les cas, référez-vous à la notice d'utilisation de votre stylo.

⚠ Pour l'injection d'analogues du GLP-1 (Byetta ; Victoza), consultez le mode d'emploi du stylo.

5 Sélectionnez la dose et insérez l'aiguille dans la peau

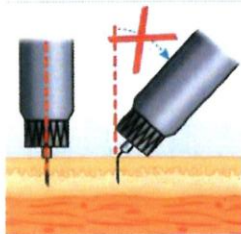

• Restez toujours dans le même axe jusqu'au retrait de l'aiguille pour éviter tout risque de torsion de l'aiguille.

• Une fois l'aiguille insérée, appuyez sur le piston pour injecter doucement la dose.

6 Respectez le temps d'injection




De façon à garantir la délivrance de la dose complète avec un stylo injecteur, il est important en fin d'injection de **maintenir** l'aiguille sous la peau en continuant à exercer la pression sur le piston pendant au moins **10 secondes**. Cela permet aux dernières gouttes d'être complètement injectées.

Consultez la notice d'utilisation du stylo.

7 Eliminez systématiquement le matériel usagé



Après chaque injection, l'aiguille doit être retirée du stylo et éliminée dans un collecteur de déchets selon la réglementation en vigueur.

- Une aiguille est un matériel stérile.
- Le symbole  signifie que l'aiguille **ne doit pas être réutilisée**.

Pour plus d'information :

www.dastri.fr

N° Vert 0 800 664 664



Consultez votre professionnel de santé pour plus d'information



Retrouvez toutes les étapes clés de l'injection dans la brochure BD "Mon guide de l'injection au stylo"

www.diabetebd.fr

Aiguilles BD Micro-Fine Ultra™ - Aiguilles à stylo, stériles, non réutilisables, destinées à l'injection parentérale de médicaments.
Mandataire UE : BD Medical – Diabetes Care, Becton Dickinson France S.A.S. Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement les recommandations d'utilisation. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour toute question au sujet de ce dispositif médical. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Référence interne du document VV-00180.
Becton Dickinson France S.A.S., BD, 11, rue Aristide Bergès, ZI des Îles, BP 4, 38801 Le-Pont-De-Claix • Société par actions simplifiées au capital de 62 823 000 euros • RCS Grenoble B 056 501 711 • Siret 056 501 711 00115.
BD, le logo BD et BD Micro-Fine Ultra sont des marques de Becton Dickinson and Company.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2015 BD.

